

## ب : صبغة فلوروكروم (Fluorochrome)

تستخدم صبغة فلوروستتية لصبغ العصبيات المقاومة للحمض مع استخدام صبغة مبيئة للخلفية مثل برمتجات البوتاسيوم او باستخدام اكريدين برتقالي (Acridin orange)

### تحضير الكواشف

أ - الصبغة :

محلول (أ) :

٠.١ جم	اورامين (Auramine)
١٠ مل	كحول ايثيلي ٩٥ %

محلول (ب) :

٣ جم	بللورات الفنيول
٨٧ مل	ماء مقطر

يمزج المحلولان (أ + ب)

يحفظ فى زجاجة بنية اللون و محكمة الإغلاق بعيدا عن الحرارة و الضوء .

ملحوظة :

إذا وجدت عكارة مع طول فترة التخزين لا يعني هذا فقد الفاعلية .

ب - محلول مزيل اللون :

محلول (ب) :

٠.٥ مل	حمض الهيدروكلوريك المركز
١٠ مل	الكحول الإيثيلي ٧٠ %



وزارة الصحة والسكان  
الإدارة المركزية للمعامل

# دليل الاختبارات المعملية الأساسية ونظم الجودة لمعامل تشخيص الدرن



إعداد

**د. مشيرة اسماعيل**

رئيس معمل تشخيص الدرن - الإدارة المركزية للمعامل